

Instrumentenreiniger

Intensivreiniger für Instrumente (Pulver)

- **reinigungsstark**
- **materialschonend**
- **Ultraschallbad geeignet**

Charakteristika

alkalischer, besonders kraftvoller und gründlicher Schnellreiniger für alkalibeständige Instrumente und Geräte aus Metall, Kunststoff, Keramik, Glas und Porzellan, nicht für den Einsatz von Endoskopen geeignet

Anwendungsbereiche / Handhabung

Selbsttätige, kraftvolle Reinigung von Instrumenten und Geräten in allen medizinischen Bereichen und Labors. Auch für thermolabile und empfindliche Materialien geeignet. Zu reinigende Instrumente und Geräte bis zur vollständigen Benetzung in die Gebrauchslösung einlegen. Reinigungszeit: 10–20 min.; Im Ultraschallbad 5–10 min.

Zur schnellen Reinigung kann die Gebrauchslösung bei thermostabilen Instrumenten erhitzt werden. Temperaturen über 50°C sind sowohl in der Gebrauchslösung als auch im Ultraschallbad zu vermeiden, da diese zu Inkrustierungen führen können. Anschließend gründlich abspülen und gegebenenfalls weiter aufbereiten.

Dosierung: Normale Verschmutzung: 1/2 Messlöffel auf 3 Liter Wasser (0,5%); Stärkere Verschmutzung: 1 Messlöffel auf 3 Liter Wasser (1%).

INTERMED Instrumentenreiniger ist kein Zusatzreiniger. Er darf nicht gleichzeitig mit INTERMED Instrumentendesinfektion UNIVERSAL/PLUS verwendet werden.

Zusammensetzung

nichtionische Tenside 5–15%, anionische Tenside <5%, Phosphate >30%. Korrosionsinhibitoren. Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung. Enthält Dinatriummetasilikat-Pentahydrat.

Besondere Hinweise

Dinatriummetasilikat-Pentahydrat. Alkohole, C 13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert; Dinatriumdodecylbenzolsulfonat. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Kann die Atemwege reizen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutztragen.

Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

Lieferformen

1 kg
5 kg

Best.-Nr.: 210051
Best.-Nr.: 210052

