

## Quick Wipes

### Desinfektionstücher

- bakterizid (inkl. MRSA) · levurozid
- aldehyd- und phenolfrei · alkoholfrei
- VAH-gelistet

#### Charakteristika

Gebrauchsfertige getränkte Wischtücher zur Schnelldesinfektion, 25 x 25 cm Tuchgröße.

#### Anwendungsbereiche / Handhabung

**Gem. MPG:** Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gem. Biozidprodukte-Verordnung:** Zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen.

Schneiden Sie den Beutel Quick Wipes Desinfektionstücher an der Schnittkante auf und setzen den Beutel mit der Rolle in den Spender ein. Ziehen Sie das erste Tuch Quick Wipes Desinfektionstücher aus der Mitte der Rolle und führen Sie den vorderen Teil des Tuches durch den Entnahmestern im Deckel des Spenders. Schließen Sie den Schutzdeckel und achten Sie dabei darauf, dass das Tuch komplett umschlossen ist.

Schließen Sie den Schutzdeckel nach jeder Tuchentnahme wieder sorgfältig, um nachfolgende Tücher vor Austrocknen zu schützen. Flächen und Gegenstände vollständig benetzen. Einwirkzeit einhalten.

Berücksichtigen Sie auch die KRINKO-Empfehlung zu „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen.“

#### Zusammensetzung

In 100 g Tränkflüssigkeit INTERMED Desinfektionslösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g;  
Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

#### Mikrobiologische Wirksamkeit

- bakterizid (inkl. MRSA)
- levurozid
- begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV/BVDV, Vaccinia-Viren

#### Listung und Zulassung

baua: Reg.-Nr.: N-55049  
VAH-gelistet

#### Besondere Hinweise

**Bei Kontakt mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Konzentration und Einwirkzeiten

Wirkspektrum und Prüfmethode			30 s	1 min	2 min
<b>Bakterien und Pilze</b>					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	VAH**	mit Mechanik, hohe und geringe Belastung		■	
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid)*	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		■	
<b>Viren</b>					
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	■		
	EN 14476	Vacciniavirus, geringe Belastung	■		

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* gelistet in der 5 Minuten-Spalte der VAH-Liste

#### Lieferformen

Rolle à 70 Tücher	Best.-Nr.: 211180
3 Rollen à 70 Tücher	Best.-Nr.: 211181
Set I bestehend aus 1 Spender + 1 Rolle à 70 Tücher	Best.-Nr.: 211182
Set II bestehend aus 1 Spender + 3 Rollen à 70 Tücher	Best.-Nr.: 211183



Stand 05/2017